

Ear Zoom halláserősítő Használati útmutató

Termék leírása:

1. Fülpánt
2. BE/KI / Hangerőszabályzás
3. Mikrofon
4. Indikátor
5. Fül-adapterek
6. Elemtartó fedél



Használat előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is.

Figyelmeztetés

- A hangerő beállításakor legyen rendkívül óvatos, nehogy a környező zajok túl nagy hanghatást fejtsenek ki, fájdalmat okozva ezzel.
- A termék NEM MINŐSÜL hallást javító egészségügyi segédeszköznek. Használatáról kérje ki orvosa tanácsát.
- A terméket tartsa távol illetéktelen személyektől és gyermekektől.
- Az elemek nem újratölthetőek.
- Az elemeket soha ne dobja tűzbe.
- Az elemeket tartsa távol a gyermekektől.
- Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket.
- Az elemeket soha ne dobja a kommunális hulladékgyűjtőbe, hanem adja le az előírásoknak megfelelő gyűjtőhelyen.
- A termék nem vízálló, ezért ügyeljen rá, hogy ne kerüljön kapcsolatba vízzel.
- Ha a termék mégis benedvedett, kapcsolja ki, vegye ki az elemeket és hagyja kiszáradni.

A készülék használata

Válassza ki a 3 higiénikus fül dugó közül az Önnek megfelelőt, és helyezze a fülébe úgy, hogy az egész nyílást befedje. Ha a hallójáratot nem fedi be teljesen a készülék, interferencia léphet fel, melynek következtében sípoló hangot hallathat a készülék.

Nyissa ki az elemnyílás fedelét és helyezze be az elemeket.
Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően vannak-e behelyezve.
Kapcsolja a kapcsológombot ON=bekapcsolás fokozatra.
Helyezze a fülére a készüléket
Állítsa be a hangerőt az Önnek megfelelő szintre.