

Használati utasítás

Digitális alkoholszonda, alkoholdetektor



Elektromos alkoholszonda a biztonságos vezetéshez. Háttérvilágítással rendelkező LCD kijelző, ami könnyen olvasható.

Megjeleníti a 'CAUTION' feliratot, ha az eredmény 0,02% - 0,05% -on belül található.

Megjeleníti a 'DANGER' feliratot, amikor eredménye eléri vagy meghaladja a 0,05% -ot.

Bekapcsolási idő: 10 mp

Megjeleníti az 'OFF' feliratot 10 másodperce a mérés befejezése után, majd automatikusan kikapcsol körülbelül 3 másodperc múlva.

Mérési visszaszámlálás: 10 mp

Mérési tartomány: 0,00% - 0,15% vagy 0,0 - 1.9g / l

2 x AAA elemmel működik. (nem tartozék)

Méretetek: 11cm x 7cm x 2,5 cm.

1. Nyomd meg a „Power” gombot egyszer és bekapcsol a digitális szonda.
2. Megjelenik a kijelzőn a „warm-up” felirat és elkezd visszaszámlálni 10-től – ezalatt a 10 másodperc alatt melegszik be a szonda.
3. Ha megjelenik a „blow” felirat akkor ismét elkezd visszaszámlálni 10-től a gép.
4. Ekkor kell elkezdni fújni a szonda tetején lévő nyílást körülbelül 5 másodpercig.
5. Leolvasható a kijelzőről a mérési eredmény.

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)