

Kulcstartós Alkoholszonda Használati Utasítás



Figyelmeztetések

- A pontos mérés érdekében várjon legalább 15 percet a méréssel az utolsó alkoholfogyasztás után.
- Az eredeti pontosság megőrzése érdekében célszerű az alkoholszondát kb. 6 havonta kalibráltatni.
- Ne fújjon dohányfüstöt az készülékbe, mert az károsíthatja az érzékelőt.
- Ne használja a -10 °C – 50 °C hőmérséklet tartományon kívül.
- A készüléket ne tisztítsa alkohollal. Helyette használjon nedves törlőkendőt, valamint semleges tisztítószereket.

Műszaki jellemzők

- 16 bites alacsony fogyasztású MCU
- Elektrokémiai érzékelő, magas megbízhatóság és pontosság
- Kétszínű LED jelzőlámpák
- Egyszerű használat
- Automatikus kikapcsolás alacsony elem töltöttségnél
- Rövid felmelegedési idő
- Gyors eredménykijelzés és rövid várakozási idő két mérés között

A készülék bekapcsolása

- ☑ Nyomja meg majd tartsa lenyomva a bekapcsoló (power) gombot.
- ☑ Várja meg míg felvillan a **piros** illetve a **sárga** led egyszerre, ne engedje fel a gombot.
- ☑ Amint a készülék bemelegedik kialszik a piros és a sárga led majd felvillan a zöld (ready) led. A készülék ekkor készenáll a használatra.
- ☑ **Fontos, hogy használat alatt végig tartsa lenyomva a power gombot.**

Ledek Jelentése

Zöld led szervezetében nincs alkohol.

Sárga led 0,02% alatti véralkohol szintet jelzi

Piros led 0,05%
szintet jelzi.

feletti véralkohol

[KATTINTSON IDE A TERMÉKÉRT!](#)

[HASONLÓ TERMÉKEK](#)